



Oxivir Excel® Foam

Оксивир Эксель Фоум - Моющее и дезинфицирующее средство, используемое для неинвазивных медицинских приборов и для непористых поверхностей

Описание: Готовое к применению дезинфицирующее средство широкого спектра действия с моющим эффектом и коротким временем обеззараживания для дезинфекции непористых поверхностей и жесткой мебели. Используется для проведения генеральной уборки. Формула средства на основе стабилизированной перекиси водорода (АНР) запатентована компанией Дайверси. Подробную информацию о сфере использования можно найти в Инструкции No23/17.

Основные характеристики

- Убивает бактерии вирусы
- Время обеззараживания - 1 минута
- Безопасно для пользователя и обрабатываемых поверхностей
- Удобно в применении - не требует подготовки поверхности или последующей стирки в прачечной
- Эффективно чистит поверхность
- Без отдушки
- Действующее вещество распадается на воду и кислород
- Не требует смыва (Подробная информация в Инструкции No23/17)

Преимущества

- Широкий спектр действия дезинфектанта обеспечивает высочайший уровень защиты больничного пациента. Эффективность действия подтверждена многочисленными испытаниями в соответствии с нормами ЕС. Средство эффективно борется с большим количеством патогенов и вирусов, включая полиомиелит, аденовирус, рото- и норовирус, ВИЧ, грипп типа А, возбудителями ОРВИ и герпес и фунгицидной активностью.
- Благодаря короткому времени обеззараживания поверхность остается влажной, что повышает эффективность дезинфекции.
- Показывает отличные результаты чистки, в том числе удаляет отложения и препятствует их образованию, что устраняет необходимость предварительной чистке поверхности.
- Безопасность для пользователя снижает риск производственных травм, средство не классифицировано как опасное, не содержит компоненты, раздражающие органы дыхания.
- Формула средства на основе стабилизированной перекиси водорода не портит поверхности и тем самым продлевает срок службы оборудования.
- Пригодно к применению в сфере здравоохранения.

Рекомендации по применению Для достижения заявленного дезинфицирующего эффекта необходимо следовать рекомендациям по дозировкам.

Пенная чистка и дезинфекция:

1. Удалить крупные видимые загрязнения.
2. Предварительно распылив на салфетку, протереть поверхность или распылить непосредственно на поверхность с помощью бутылки с распылителем с последующим протиранием салфеткой.
3. Выдержать время обеззараживания (поверхность должна быть влажной во время обеззараживания). В некоторых случаях промыть водой и протереть насухо.

Внимание: Не смешивать с другими продуктами. Не применять на поверхностях, чувствительных к воде или кислотам.

Физико-химические свойства:

Внешний вид:	Прозрачная желтоватая жидкость
Относительная плотность при 20С:	1,000
pH раствора:	1,95
Точка воспламенения:	нет данных
Срок годности:	2 года
Запах:	нейтральный

Настоящие данные являются стандартными значениями и не заменяют спецификацию.

Информация по хранению и утилизации: Подробная информация по утилизации содержится в паспорте безопасности средства. Хранить в заводской упаковке, при температуре от плюс 6С до плюс 35С. Избегать перепадов температуры. Сильный окислитель.

Совместимость: При соблюдении рекомендаций средство совместимо с большинством часто встречающихся материалов.

Информация о воздействии на окружающую среду: ПАВ, входящие в состав, полностью биоразлагаемые (законодательство ЕС 648/2004).

Микробиология: Эффективность подтверждена: EN1276, EN1650, EN13624, EN14476.

Область применения: В соответствии с рекомендациями производителя. Более подробную информацию можно найти в Инструкции No23/17. Инструкция разработана ФБУН «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Роспотребнадзора

Бактерии: готово к применению, время обеззараживания 1 минута

Вирусы: готово к применению, время обеззараживания 1 минута

Кандида альбиканс: готово к применению, время обеззараживания 1 минута



© A.I.S.E.

ООО "Дайверси"
125445, Москва, ул. Смольная, 24Д
тел: +7 (495) 970 1797
www.diverseyprofessional.ru
www.diversey.com

190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4 "А", офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

© 2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved.